

_CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VUELO PHARMA

NUEVAS

POSIBILIDADES

MEMBRACEL

FDA nº 3006611176

ANVISA nº 80074780002



_Membrana

Regeneradora

Porosa

Por que Membracel?

Membracel es una membrana de celulosa para uso médico, capaz de substituir temporalmente la piel humana y promover la rápida regeneración en lesiones causadas por quemaduras, úlceras de miembros inferiores o cualquier otra situación donde ocurra la falta de epidermis o de la dermis, en cualquier fase de la cicatrización.


Intervalos de cambio

La frecuencia de intercambio de la membrana dependerá de la condición de la herida y del volumen de exudado (secreción de la herida). Al principio del tratamiento, es normal que la necesidad de cambio se dé cada 5 días. Con el paso del tiempo, ese intervalo aumentará naturalmente como consecuencia de la reducción del volumen de exudado secretado por la lesión. Membracel puede ser mantenido en la lesión por hasta 12 días, siempre que no ocurra su desprendimiento o rompimiento, signos de infección, dolor agudo o mal olor.


FORMA DE APLICACIÓN




1 Con suero fisiológico, limpie la herida y su región periférica.

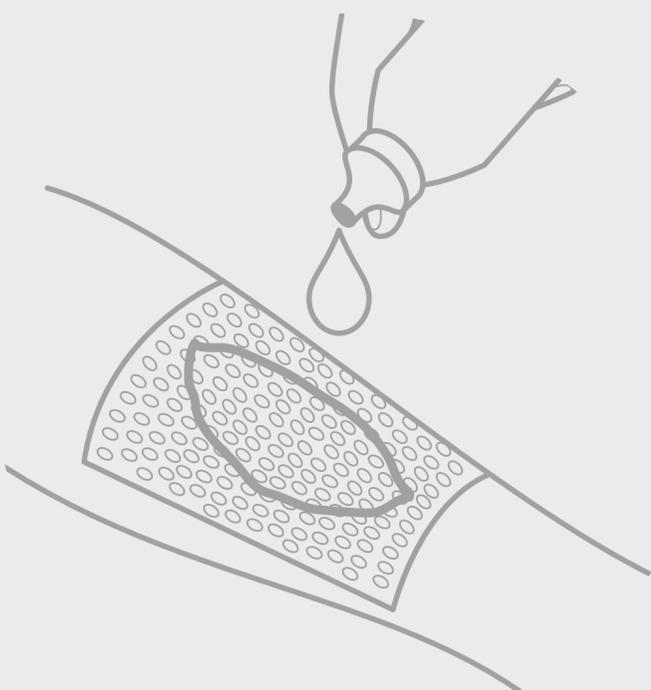

2 Coloque la membrana sobre la lesión y humedezca completamente con suero fisiológico.

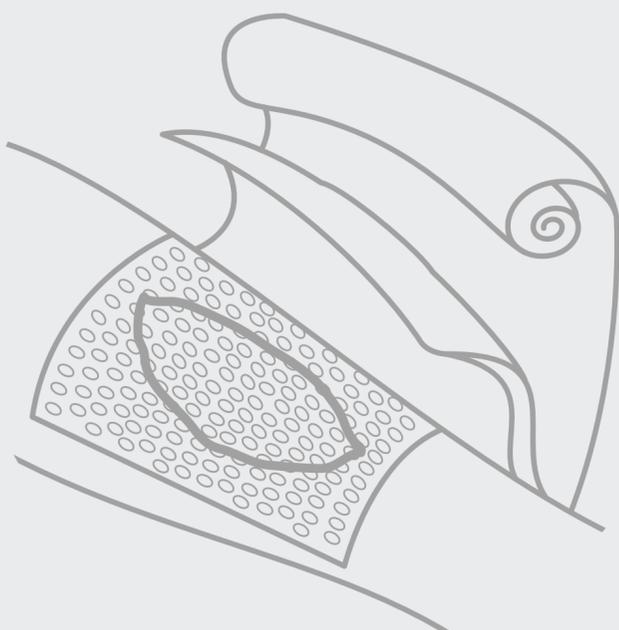

3 Acomode una gasa sobre la membrana y fíjela utilizando una banda o cinta microporosa, haciendo una ligera compresión para ayudar en la remoción del exudado o secreción.

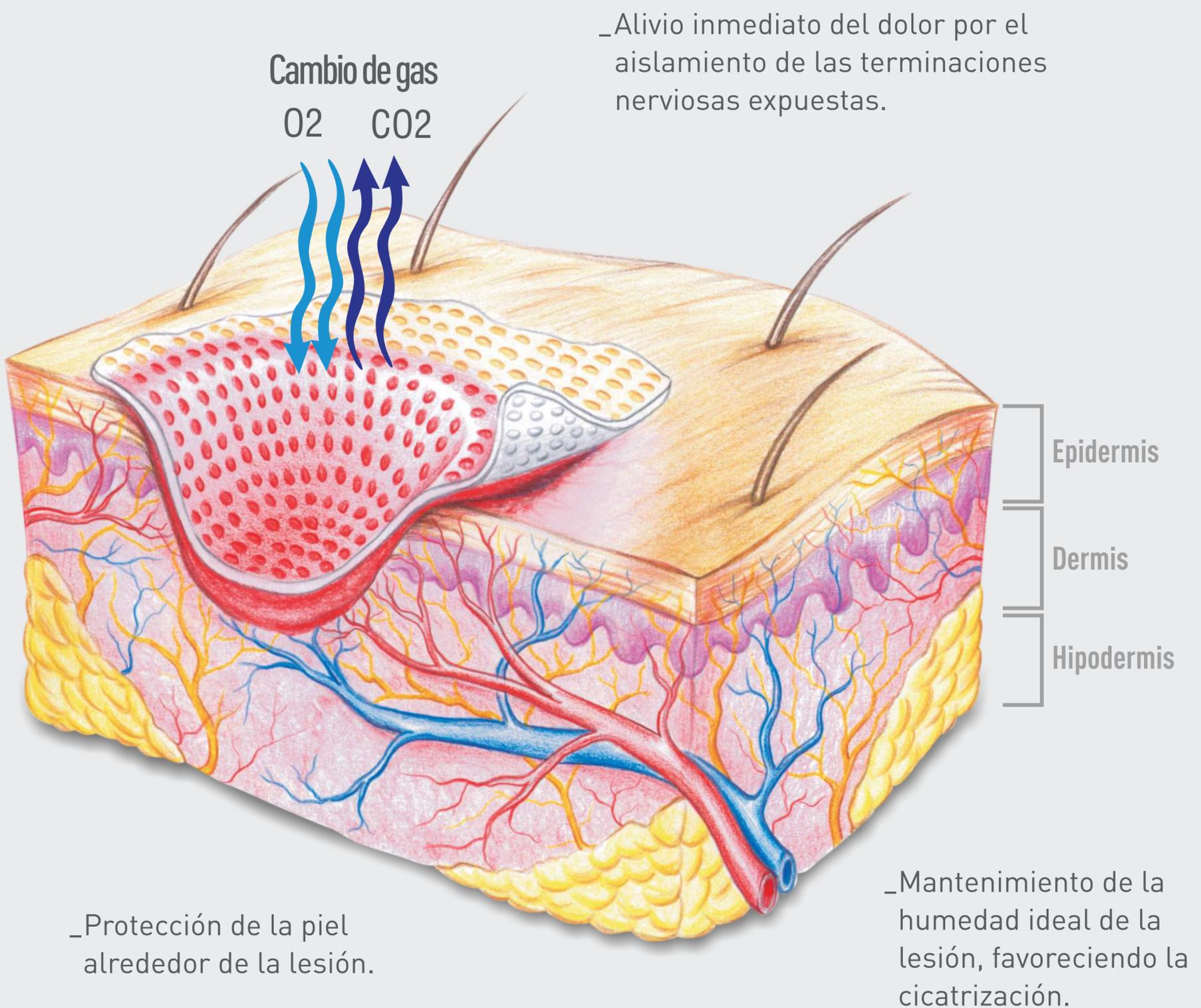

_Beneficios

- _ Disminuye el dolor;
- _ Acelera la cicatrización;
- _ No causa reacciones adversas;
- _ Menor costo de tratamiento;
- _ Fácil aplicación y adaptación al lecho de la lesión;
- _ Protege la lesión;
- _ Más comodidad al paciente;
- _ Facilita el drenaje de las secreciones;
- _ Mantener la humedad natural en el lecho de la lesión;
- _ Promueve intercambios gaseosos;
- _ Facilita la limpieza y el acceso de medicamentos a la herida;
- _ No deja residuos al ser removida;
- _ Permite la visualización y seguimiento de la evolución de la lesión sin la remoción de la membrana.

GELIFICANTE PARA BOLSAS DE OSTOMIA

El Gelificante para Bolsas de Ostomia de Vuelo Pharma aromatiza el contenido almacenado por bolsas de estómago (heces y orina). Ayuda en la inserción social, ya que el estomizado se siente más seguro para salir de casa e higienizar la bolsita en cualquier baño. Las cápsulas también gelifican los líquidos de la bolsa, evitando infiltraciones y fugas.

**_Gránulos
para Absorción
de Líquidos**



Cadastro ANVISA nº 80074789001

SPRAY DE BARRERA

El Spray de Barrera Vuelo Pharma protege hasta 72 horas. Con secado rápido, es una solución no grasa, resistente al agua y sin alcohol que forma una película protectora y uniforme, sin provocar irritaciones.

Protege la piel de las lesiones causadas por incontinencia urinaria o fecal, evita la aparición de lesiones por presión y protege la piel alrededor de estomias y previene heridas causadas por un cambio constante de vendajes con cola. Puede ser aplicado en la piel sana, irritada o lesionada, sin causar ardor o incomodidad. Dermatológicamente probado.



_Protector

Cutâneo

Cadastro ANVISA nº 80074780003

Somos una empresa de personas para personas. Nosotros existimos para que usted pueda tener más libertad, autonomía y seguridad, para vivir más con menos preocupaciones. Traemos conocimiento, nuevas experiencias y, con ellas, nuevas posibilidades.

vuelopharma.com.mx

atencionaclientes@vuelopharma.com.mx



ANVISA

Registro ANVISA
80074780002



Listed FDA
3006611176

Fabricado y registrado por:

Vuelo Pharma Ltda.

Industria Brasileira

Responsable técnico:

Helen de Moraes A. de Souza
CRF-PR 31612